


# AeroChamber Plus Flow-Vu\*

Anti-Static Valved Holding Chamber

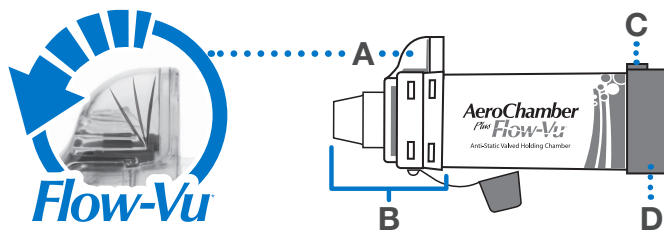

## NAMJENA

Ova komora je namijenjena za uporabu uz inhalator sa odmjerenim doziranjem za dostavljanje aerosol lijeka u vaša pluća prema receptu vašeg zdravstvenog radnika.

## PRIJE SVAKE UPORABE

Ova komora se može koristiti direktno iz pakiranja. Obavezno pročitajte ove upute i upute dostavljene uz inhalator. Pažljivo pregledajte komoru i uklonite sve strane stvari. U slučaju oštećenja ili nedostajući dijelova, odmah zamijeniti.

### Napomene



USPORITE udisanje ako čujete pištanje – to znači da prebrzo udišete.




Ako vam netko pomaže, može koristiti **Flow-Vu\*** indikator udisanja kako bi osigurao dobru zatvorenost, uskladio pritiskanje inhalatora sa udisanjem i izbrojao broj udisaja. **Flow-Vu\*** indikator se pomiče prema vama kada udahnete i pomiče se samo ako ste valjano zatvorili usne oko dijela koji se stavlja u usta.

**Ix** Dozirajte po jedno (1) izbacivanje. Slijedite upute priložene uz inhalator o tome koliko dugo trebate sačekati prije ponavljanja postupka.

## KAKO SE KOMORA KORISTI

Za pripremu inhalatora, slijedite upute priložene uz inhalator.

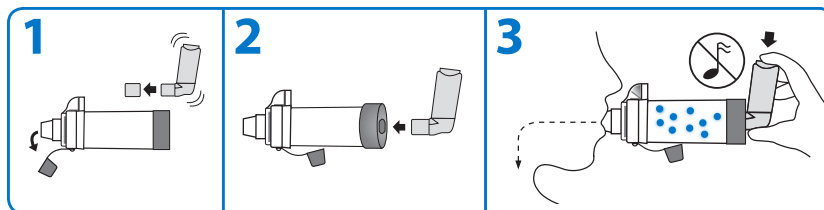

**1** Uklonite čepove s inhalatora i komore dijela koji se stavlja u usta. Protresite inhalator neposredno prije uporabe prema uputama priloženim uz njega.

**2** Umetnite inhalator u stražnji dio komore. Stavite dio koji se stavlja u usta u usta i zatvorite usne oko njega kako biste osigurali djelotvorno zatvaranje.

**3** Izdahnite i pritisnite inhalator jedanput na početku laganog udisaja. Udahnite lagano i duboko kroz komoru dok potpuno ne udahnete. Zadržite dah 5-10 sekundi prije no što izdahnete. **III** Izdahnite i pritisnite inhalator jedanput na početku laganog udisaja. Udahnite i izdahnite kroz komoru 2-3 puta držeći usne čvrsto zatvorene oko dijela komore koji se stavlja u usta.




Možete gledati jednostavno korištenje videozapisa pacijenta na **YouTube.com**



## UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Ova komora se može koristiti direktno iz pakiranja a potom čistiti tjedno.

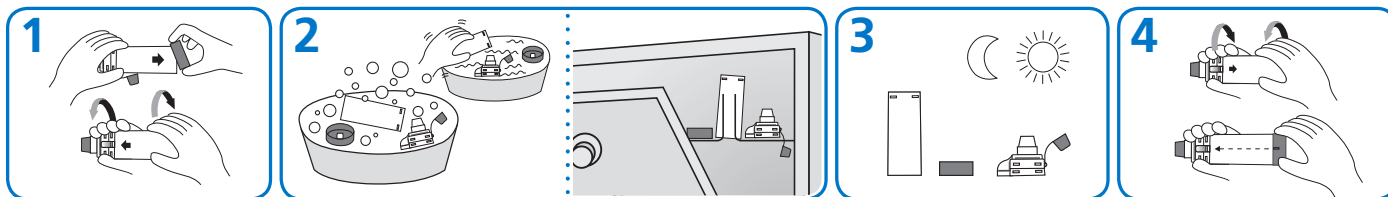

**1** Uklonite stražnji dio (D). Da biste odvojili prednji dio (B), uvrnite komoru kao što je prikazano.

**2** Potopite dijelove na 15 minuta u blag rastvor tečnog deterdženta za posuđe i mlake čiste vode. Blago promiješajte. Isperite dijelove u čistoj vodi. **III** Stavite dijelove na gornju policu u perilici posuđa. Povedite računa da proizvod bude sigurno postavljen okrenut licem nagore. Pokrenite perilicu na uobičajenom ili kratkom programu. Nemojte koristiti sušenje.

**3** Istresite višak vode i ostavite u vertikalnom položaju da se osuši na zraku. Prije ponovnog sklapanja provjerite jesu li dijelovi suhi.

**4** Za ponovno sklapanje, postavite prednji dio (B) na kraj komore i čvrsto ga zavrtnite dok ne bude sigurno pričvršćen na mjesto. Poravnajte oznaku za poravnavanje (C) na stražnjem dijelu sa **Flow-Vu\*** indikatorom inhalacije (A) kao što je prikazano. Čvrsto pritisnite da biste pričvrstili stražnji dio (D).

### Napomene

- Nemojte prokuhivati ili sterilizirati.
- Proizvod se treba zamijeniti nakon 12 mjeseci uporabe.
- Ovaj proizvod ne sadrži lateks.
- Nemojte dijeliti ovaj medicinski uređaj sa drugima.
- Ako primijetite naslage lijeka u komori, pažljivo operite unutarnjost komore mekom krpom.
- Ne preporučuje se pranje u perilici sa jako zaprljanim posuđem.
- U slučaju čišćenja u perilici posuđa, koristite sredstvo za ispiranje.

### Mjere opreza

- Nemojte ostavljati komoru na dohvata djece bez nadzora. Ovo nije igračka.
- Proizvod se može trajno oštetiti ako se prokuhava, sterilizira ili čisti u perilici posuđa na temperaturi višoj od 70°C.